


Introduktion

AngelSounds JPD-100S er beregnet til at opfange dit ufødte barns hjertelyd. Hjertelyd kan høres tidligt i graviditeten, sædvanligvis fra 16. uge og frem til fødselstidspunktet.

Monitoren kan betjenes med en hånd. Apparatet er udstyret med tænd/sluk knap (1), og en lampe som viser om apparatet er aktiveret (2). Der medfølger en hovedtelefon og kabel (3).

AngelSounds JPD-100S fungerer vha. sensormodulet (4) som udsender en nominal 3.3 MHz Doppler ultralyds-frekvens. Apparatet leveres med 1 stk batteri (5). Batteriet må ikke genoplades og bør efter endt brug bortskaffes gennem offentlig batteriopsamling.

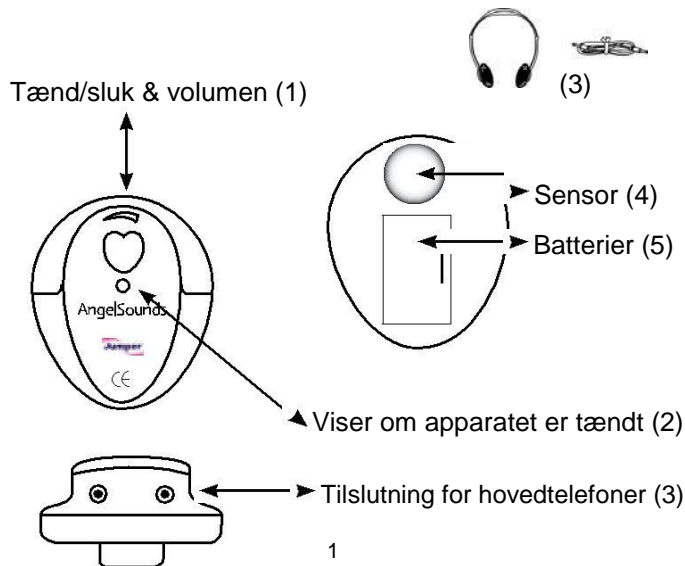

Hvordan bruges AngelSounds

- a) Indsæt hovedtelefonens jackstik i stikket (3)
- b) Smør lidt vandbaseret gel på maven (4)
- c) Tænd apparatet på tænd/sluk & volumen knappen (1)
- d) Indstil volumen (1) og apparatet er klar

Lytning

Placer sensormodulet på maven og flyt det langsomt indtil der opnås et godt signal. Dette vil lyde som "små galoperende heste". Det er eventuelt nødvendigt at vinkle/lade apparatet hælde en smule for at opnå et godt signal.

Kablets anvendelse

Da du anvender den ene af de to stik indgange til hovedtelefonerne kan den anden stikindgang og det medfølgende kabel anvendes til at optage hjertelyden vha. en båndoptager.

Også moderens hjertelyd kan optages og senere afspilles for den nyfødte.

Efter brug slukkes apparatet på tænd/sluk knappen (1) Batteriet udskiftes ved at løfte batteridekslet og indsætte et nyt batteri (IEC6F22 9v alkaline.) Et nyt batteri svarer til ca. 8 timers lytning.